

HEPATITES 2017 n° 2

Nombre d'inscrits : 153

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 25 mai 2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 26 juin 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : ABP HEP 17-2A

Echantillon de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

Cas clinique

Patiente de 25 ans ayant consulté pour fatigue persistante et arthralgies.

HEPATITE A (HAV)

	Réactif utilisé	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
Ac IgG ou totaux		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac IgM		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Absence d'anticorps anti-HAV | <input type="checkbox"/> Vaccination conseillée |
| <input type="checkbox"/> Présence d'IgM anti-HAV | <input type="checkbox"/> Pas d'interprétation |
| <input type="checkbox"/> Présence isolée d'IgG anti-HAV | |

HEPATITE B (HBV)

	Réactif utilisé	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
Ag HBs		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBs		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBc IgG ou totaux		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBc IgM		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ag HBe		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBe		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Réponse anticorps post vaccinale | <input type="checkbox"/> Hépatite B guérie |
| <input type="checkbox"/> Présence d'anticorps anti-HBc isolés | <input type="checkbox"/> Pas d'interprétation (ensemble des 3 marqueurs non recherché) |

HEPATITE C (HCV)

	Réactif utilisé	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
Ac anti HCV		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

<input type="checkbox"/> Absence d'anticorps anti-HCV	<input type="checkbox"/> Sérologie à interpréter en fonction du contexte clinique
<input type="checkbox"/> Présence d'anticorps anti-HCV	<input type="checkbox"/> Pas d'interprétation
<input type="checkbox"/> Présence d'anticorps anti-HCV, à contrôler sur un second prélèvement	